

## SPECIFICATIE TEHNICA MANER CALATORIE 2 VENTUZE RIDDER

**Cod produs: 3026813**

- Gama: Assistant
- Dimensiuni aproximative: 32 x 12 x 3,2 cm
- Greutate bruta: 0.6912 g
- Culoare: alb
- Se poate monta rapid si usor pe orice suprafata neteda si stabila
- Detasabil, nu lasa reziduri
- Optimizat din punct de vedere ergonomic
- Culoare ce se potriveste cu majoritatea obiectelor sanitare
- Poate fi curatat cu detergent lichid standard si dezinfectant sub forma de spray
- Garantie 3 ani impotriva ruperii/spargerii si ingalbenirii
- Testat TÜV Rheinland LGA - rezistent pana la 70 kg
- Instructiuni imprtante: Suprafata pe care se monteaza manerul trebuie sa fie neteda si stabila. De asemenea, aceasta nu trebuie sa fie acoperita cu praf sau alte impuritati (nu fixati pe rosturile dintre placile de faianta!). Deschideti ambele manete de vid, plasati manerul pe locul de fixare, apasati usor si inchideti manetele. Gata! Inainte de fiecare utilizare verificati neaparat daca manerul este bine fixat.
- Instructiuni de curatare si intretinere: 1. Nu utilizati pentru curatare decat detergenti adecvati din comert. 2. Nu utilizati detergenti pe baza de solventi, agresivi sau abrazivi.





**RIDDER** | *Assistent*

★★★★★ COMFORT



**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE SI UTILIZARE  
MANER DE CALATORIE CU 2 VENTUZE  
A0150201**

## **NOTA!**

Stimate client,


Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

### **Instructiuni de siguranta:**

Aceste ventuze de aspiratie servesc pe post maner de prindere si va sprijina in timp ce stai in picioare pana la rezolvarea problemelor de echilibru. Durata de viata recomandata: 5 ani.

Acest maner de prindere este facut numai pentru utilizare temporara, recurenta si trebuie sa fie reinstalat inainte de fiecare utilizare. Aceste ventuze de aspirare sunt potrivite pentru persoane cu greutatea corporala de maxim 100 kg si serveste ca maner de prindere sau sprijin in timp ce stai in picioare. Nu-l utilizati pentru a atarna lucruri pe el. A nu se lasa la indemana copiilor materiale de ambalare. Suprafetele umede pot afecta functia anti-alunecare.

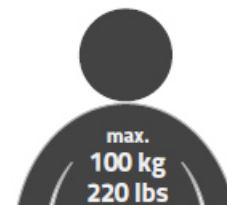

### **Utilizarea:**


#### **ATENTIE!**

Pericol de cadere la locul de montare!

Bara de prindere a aspiratiei atinge o putere de retinere foarte mare datorita constructiei aspiratiei ventuzei, cupelor si vidului care rezulta prin strangerea lor. Puterea detinuta de catre maner este atinsa doar atunci cand pozitia de montare este suficient de solida pentru a mentine sarcina si cand este garantat ca vidul a fost indeplinit.

Pozitia de montare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- Stabilitatea peretelui de fixare (1,5 x sarcina maxima)
- Curatirea (fara grasimi, murdarie si praf)
- Impermeabilitatea aerului (de exemplu, sticla, placi vitrate)
- Suprafata neteda

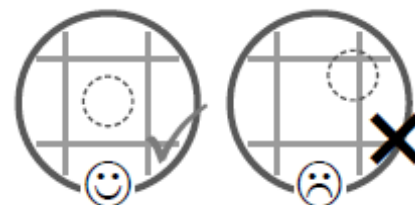

#### **Nota de avertizare pentru efectuarea vidului:**

Lumina si urmele foarte putin vizibile de deteriorare ale suprafetei de aplicare pot afecta efectuarea vidului si, prin urmare puterea de aspiratie extrem de mare. Din acest motiv, va recomandam sa testati foarte atent fiecare pozitie dorita inainte de utilizare si sa luati in considerare sfatul unui expert.

## **IMPORTANT!!**


**Verificati cu atentie puterea de mentinere inainte de fiecare utilizare !!!**

**Nu utilizati produsul daca este deteriorat !!!**


## MONTAREA:




**1. Verificati cu atentie locul de montare, daca este potrivit si pentru a exclude posibile daune, asa cum este descris anterior.**

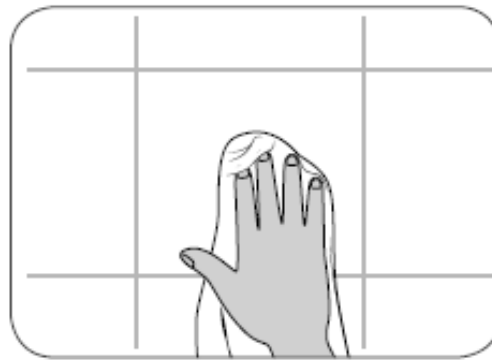


**2. Curatati cu atentie suprafata inainte de montare cu solutii obisnuite din comert si aveti grija ca suprafata sa nu prezinte murdarie, praf si grasime.**

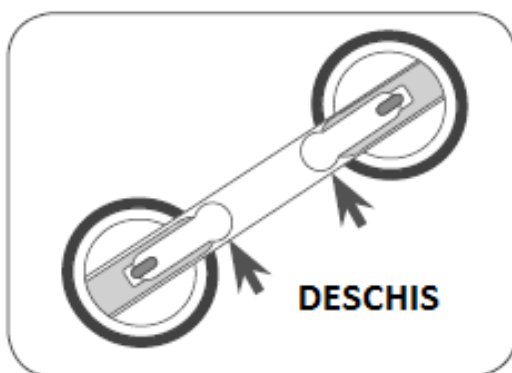

**3. Asigurati-va ca parghiile de fixare sunt deschise, inainte de montare.**

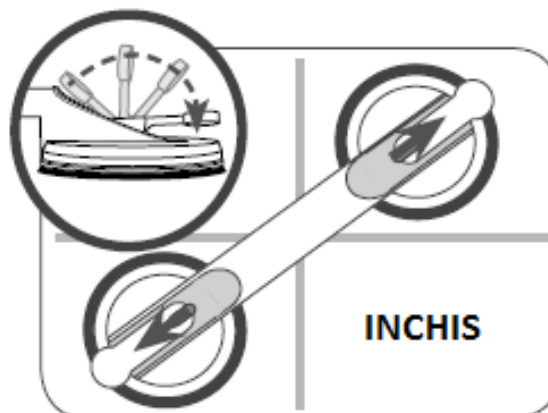


**4. Apasati manerul cu presiune in pozitia de montare pe perete si inchideti maneta de fixare. In acest fel apare efectul de vid.**

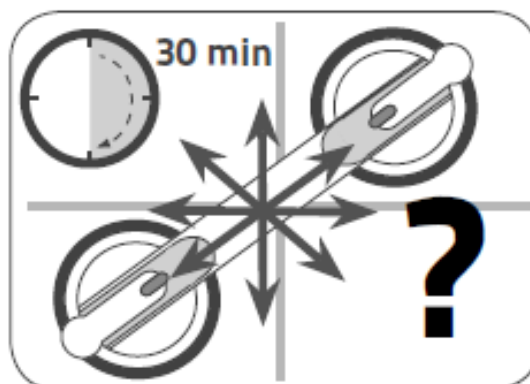

**5. Inainte de utilizare, va rugam sa asteptati 30 de minute de precautie si apoi verificati din nou puterea de sustinere.**

## DEMONTAREA SI REUTILIZAREA:

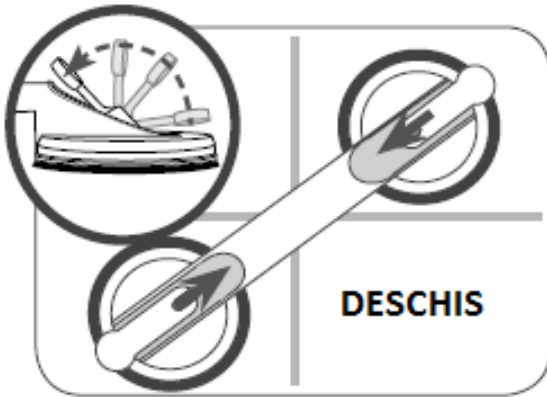

**6. Pentru demontare deschideti parghiile si desprindeti manerul de pe perete.**



**7. Daca ventuzele prezinta reziduuri de murdarie poate fi spalata cu apa si sapun obisnuit. Nu utilizati acid, pe baza de solvent sau agenti de curatare abrazivi! Dupa curatare, manerul de sustinere este pregatit pentru o noua utilizare. Va rugam sa respectati pasii 1. - 5.**

### **i** NOTA!

#### **Instructiuni de curatare si ingrijire:**

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare si ingrijire.

In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat. Curatati-l cu apa si detergenti comerciali obisnuiti. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

Nu folositi niciodata agenti de curatare abrazivi, cu solventi sau acizi pentru a curata ventuza. Ventuza ar trebui sa fie curatata cu apa si cu sapun.

Asigurati-va ca nu exista praf pe ventuza si pe perete, altfel puterea de sustinere poate fi afectata.