



**RIDDER**

*Assistent*

★ ★ ★ ★ ★ COMFORT



**MANUAL DE ASAMBLARE SI UTILIZARE  
SUPTOR AJUTATOR ACCES CADA  
A00300101**



## **NOTA!**

Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

### **Instructiuni de siguranta:**

Acest produs este conceput pentru a fi folosit in incaperi umede si serveste ca sprijin pentru intrarea si iesirea din cada. Atentie: Acest ajutor pentru urcarea in cada nu este o bara de prindere! Stabilitatea este redusa atunci cand ajutorul de accesibilitate este instalat pe cada cu plinte din plastic sau ipsos!

Inainte de instalare, suprafata trebuie sa fie curata si fara grasimi. După montare, asteptati 12 ore inainte de prima utilizare. Inainte de fiecare utilizare, verificati daca produsul este montat in siguranta.

Pastrati materialele de ambalare la distanta de copii.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta.

Durata de viata maxima: 5 ani.

Nu utilizati produsul daca este deteriorat.


### **Instructiuni de curatare si ingrijire:**

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare și ingrijire.



In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati-l cu apa si detergenti obisnuiti din comert. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

## CONTINUT PACHET:

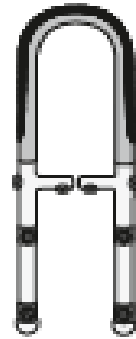

1x

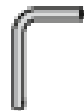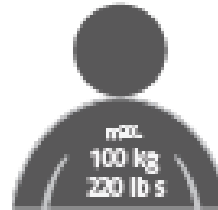

2x



1x




2x



2x



4x

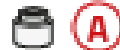

4x



4x



2x



4x



2x



1x

# ASAMBLAREA:

