

SPECIFICATIE TEHNICA
SCAUN AUXILIAR AJUSTABIL PENTRU CADA RIDDER

Cod produs: 3046884

- Gama: Assistant
- Dimensiunea sezutului: aproximativ 40,5 x 36 cm
- Dimensiuni totale: aproximativ 68,3 - 82,2 x 36 x 18 cm
- Suprafata reglabila: aproximativ 68,3 – 82,2 cm
- Potrivit pentru cazile cu latime standard (latimea din interiorul cazii trebuie sa fie de minim 53 cm si maxim 68 cm)
- Greutate bruta: 2.4 kg
- Culoare: alb
- Convenabil si elegant
- Fara componente cu muchii ascutite
- Materiale de inalta calitate, durata lunga de viata
- Usor de montat (cutia in care este ambalat contine instructiuni detaliate pentru montaj)
- Poate fi curatat cu detergent lichid standard si dezinfectant sub forma de spray
- Garantie 2 ani impotriva ruperii/spargerii si ingalbenirii
- Testat TÜV Rheinland LGA - rezistent pana la 110 kg
- Indicatii importante! Inainte de utilizare verificati neaparat pozitionarea uniforma a reglarii pe inaltime. Picioarele trebuie sa stea pe toate cele 4 puncte de contact, pe marginea cazii
- Instructiuni de curatare si intretinere: 1. Nu utilizati pentru curatare decat detergenti adecvati din comert. 2. Nu utilizati detergenti pe baza de solventi, agresivi sau abrazivi.
- Produsul este testat **TUV Rheinland si are marca GS**

*TÜVRheinland funcționează ca o organizație de testare tehnică în domeniile siguranței, eficienței și calității
Sigiliul de siguranță certificat (marca GS) certifică faptul că un produs gata de utilizare îndeplinește cerințele de la punctul 21 din Legea privind siguranța produsului (ProdSG). Marca GS este încă singura marcă de siguranță a produselor reglementată legal în Europa*



RIDDER | *Assistent*

★ ★ ★ ★ ★ COMFORT



A180101





Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Acest produs este conceput pentru aplicarea in incaperi umede si serveste doar ca scaun in cada. Verificati pozitia scaunului inainte de fiecare utilizare; consolele trebuie sa se sprijine corespunzator pe toate cele 4 puncte de contact de pe marginea cazii.

Nu va ridicati in picioare pe scaun.

Pastrati materialele de ambalare departe de copii.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta. Certificatul nu contine teste pentru utilizarea persoanelor / pacientilor aflati in reabilitare sau ingrijire medicala.

Utilizarea maxima recomandata este de 5 ani.

Nu utilizati produsul daca este deteriorat.


Instructiuni de curatare si ingrijire:

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare și ingrijire.

In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati-l cu apa si detergenti obisnuiti din comert. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

CONTINUTUL PACHETULUI:

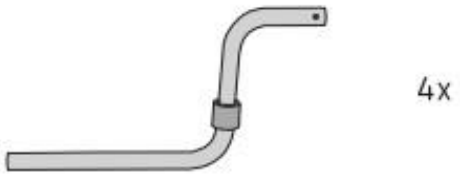

ASAMBLAREA:

