




RIDDER

Assistent


★★★★★ ECO




**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
SCAUN DE BAIE CU DUBLA UTILIZARE
A0042001**

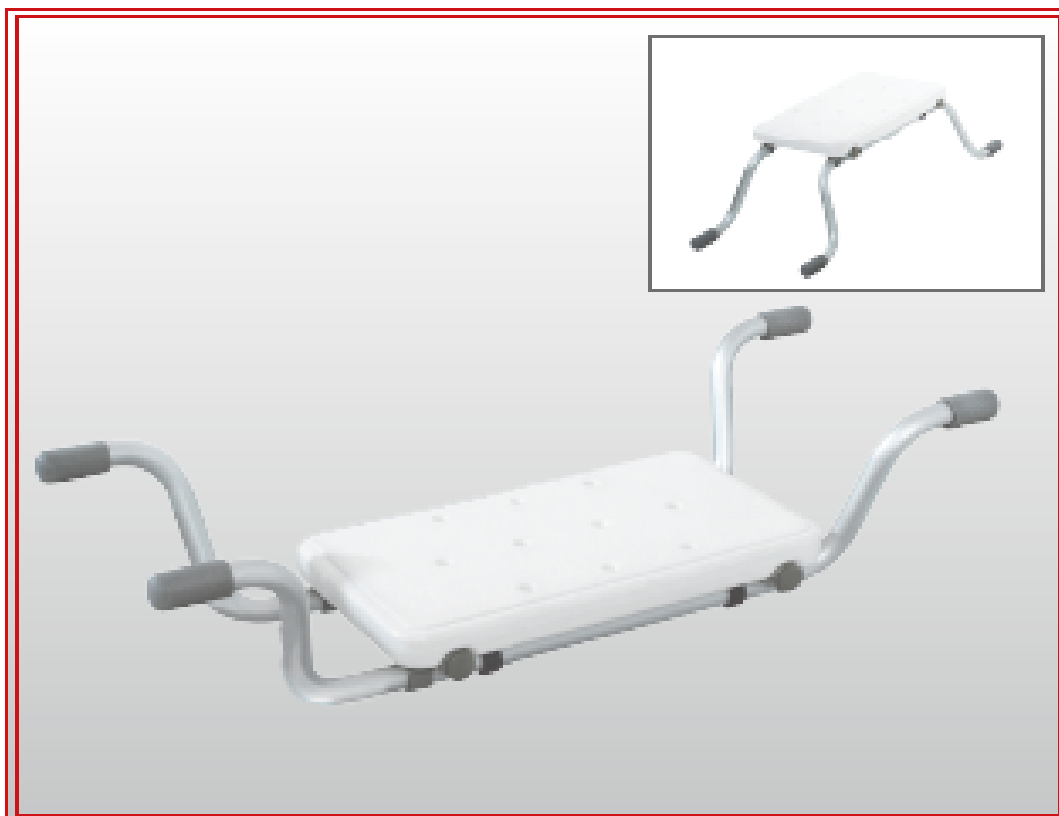


CONTINUTUL PACHETULUI:

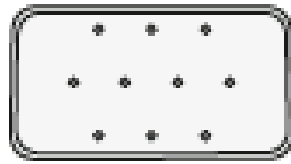


1x

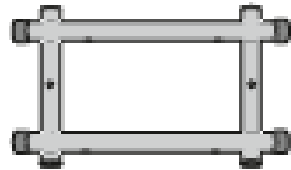

1x

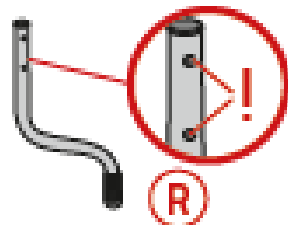

2x

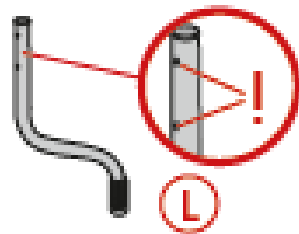

2x




4x



2x



2x

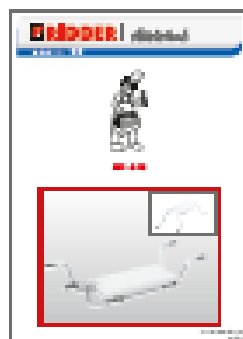

1x

i NOTA!

Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizare ulterioara.

Producatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Acest produs este conceput pentru utilizarea in incaperi umede. Scaunul pentru cada serveste doar ca scaun in cada atunci cand picioarele sunt ridicate. Folosit ca taburet serveste doar ca optiune pentru utilizarea in interiorul bii.

Verificati pozitia scaunului inainte de fiecare utilizare; consolele trebuie sa se sprijine corespunzator pe toate cele 4 puncte de contact de pe marginea cazii / podelei. Evitati sa bruscati produsul.

Pastrati materialele de ambalare departe de copii. Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta.

Utilizarea maxima recomandata este de 5 ani. Nu mai utilizati produsul daca este deteriorat.

Instructiuni de curatare si ingrijire:


Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare si ingrijire.




In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati-l cu apa si detergenti comerciali standard. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

ASAMBLAREA

VARIANTA NR. 1:

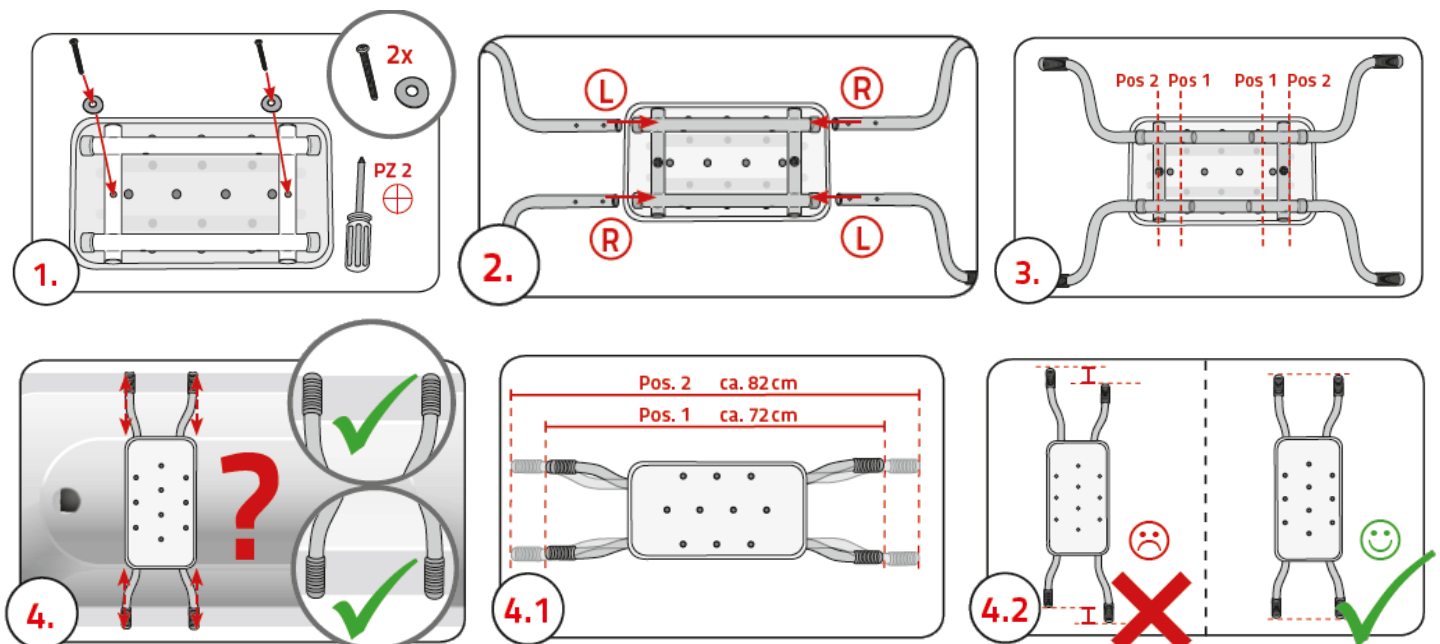

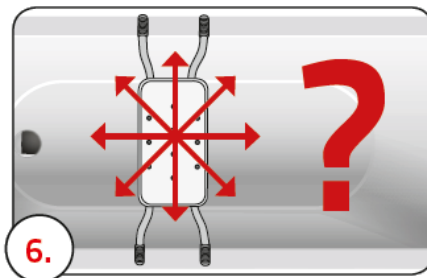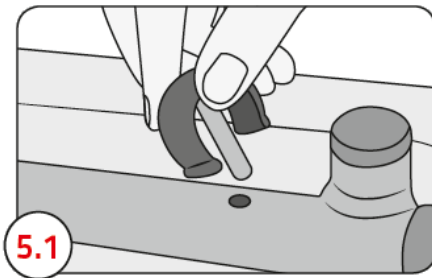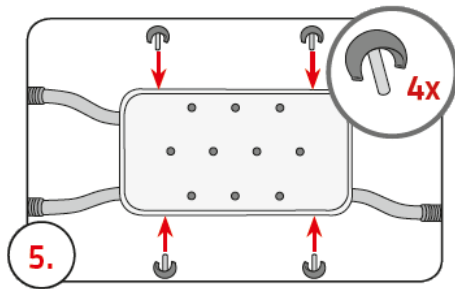

VARIANTA NR. 2:

