



RIDDER

Assistent

★★★★★ PREMIUM



RO

**Manual de utilizare
Rolator pentru interior
A0300301**

CONTINUTUL PACHETULUI:



1x Cadru ajutator pentru
mers in interior



1x Tava



1x Cos de panza



1x Manual de instructiuni

INTRODUCERE:



Draga client,

Iti mulțumim ca ai ales produsul nostru.

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de folosire!

Producatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a cadrului de mers pe jos.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA:

SINTEZA DE SIGURANTA

NU instalati si nu utilizati acest echipament inainte de a citi si a înțelege aceasta fisa de instructiuni. Daca nu puteti intelege avertismentele, precautiile sau instructiunile, contactati un profesionist din domeniul sanatatii sau tehnic personal inainte de a incerca sa instalati acest echipament - in caz contrar, pot aparea daune sau raniri.

Fiecare persoana trebuie sa se consulte intotdeauna cu medicul sau terapeutul sau pentru a determina reglarea si utilizarea corespunzatoare.

- A se utiliza numai pe pardoseli plate și solide
- NU va așezați pe cadrul ajutor de mers
- Greutate maxima admisa: 100 kg
- Greutatea maxima a comprimatului: 4,5 kg
- Greutatea maxima a coșului: 4,5 kg
- Verificati intotdeauna franele dupa fiecare reglare a inaltimii pentru a evita o flexie libera al cablului.
- Verificati intotdeauna daca ambele tuburi ale manerului sunt fixate corespunzator - inaltimea si butoanele de fixare pentru reglarea inaltimii manerului.

Nerespectarea acestor avertismente poate duce la vatamari corporale.

Toate rotile TREBUIE sa fie in contact cu podeaua in ORICE MOMENT in timpul utilizarii.

Acest lucru va va asigura echilibrarea corespunzatoare a cadrului ajutor de mers pentru interior.

DESCRIERE:

Important: Verificati toate partile ce pot fi deteriorate la transport. In cazul posibilelor daune de expediere, NU folositi produsul, contactati distribuitorul pentru mai multe detalii si instructiuni.



ASAMBLAREA:









UZ ZILNIC!





cos detasabil inclus

DEPOZITAREA:



